

フェイスシールド(FACE SHIELD)


取り扱い説明書

【本製品の用途及び特徴】

- ①本製品は、飛沫感染防止用透明マスクとして医療機関、介護施設や接客・レジなど対面現場、各種工場などで御使用頂けます。
- ②本製品は超軽量(23g)でヘアークラップなどの上からもバンドの調整により装着可能となっておりサイズの調整が簡単です。
- ③高透明な素材を使用している為、視野範囲も広く確保し視界良好な製品となります。
- ④使い捨てタイプで清潔で安全な仕様としています。
- ⑤製品仕様
 - 1)フェイスシールド材質：PET材質(厚み0.188mm)もしくはPP材質(厚み0.25mm) 製品サイズ 縦220mm x 横320mm どちらも透明性に優れています。
 - 2)バンド材質：PP材質(厚み0.25mm) 製品サイズ 幅40mm x 長さ680mm バンドの長さは調整可能です。


取り扱い説明

下記の番号に沿って組み立ててください

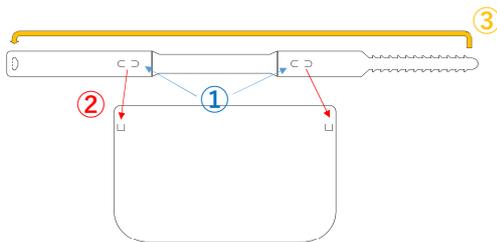

- ①折筋部を曲げる
- ②シールドホルダーをフェイスシールドに取り付け(2か所)
- ③シールドホルダーの後頭部でサイズ調節


②組立詳細

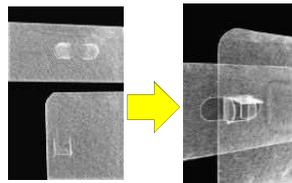

③組立詳細



完成品

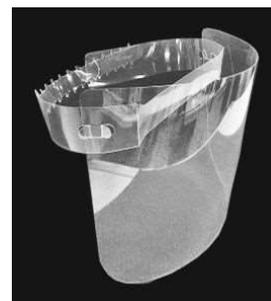

【使用上の注意事項】

- ①本製品は浮遊粉塵の発生する作業などに対しては保護になりませんので御注意ください。
- ②常に保護面を綺麗な状態にして頂き御使用ください。また、一度御使用頂きました製品は再使用しないでください。
- ③過度の高温状況下(火気付近等)では使用せず、一般環境下での使用をお願い致します。
- ④分解、修理、改造はしないでください。事故や破損の原因となります。
- ⑤保護面に傷がついたり、透明度が低下した場合は速やかに新しいフェイスシールドと交換願います。そのままの御使用は目の疲労や破損の原因になります。
- ⑥長い時間使用して頂いていると緩むことがありますので都度点検をして頂くようお願い致します。
- ⑦本製品の接合部分の緩みが気になる場合は、テープ等で補強して頂き御使用頂く事を推奨致します。
- ⑧簡易的な組み立て式の為、強く引っ張ったりしますと接合部分が破損する事が有りますので御注意願います。
- ⑨シートの端で手指を傷つける可能性がございますので組み立ての際は御注意ください。
- ⑩商品は曝露等を防止する目的のもので完全にウイルスを防ぐものではありません。
- ⑪直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。
- ⑫本製品をご使用後は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
- ⑬本製品の装着時に毛髪が巻き込まれる場合がある為、御注意願います。

【お問い合わせ先】

千代田インテグレ株式会社
〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-7-27
営業部 フリーダイヤルTEL:0120-772-522 URL:<http://www.chiyoda-i.co.jp>



高透明フェイスシールド ウイルス・飛沫感染防止用

特徴


- ・安心の日本製
- ・超軽量（23g）
- ・高透明
- ・サイズ調整可能
- ・使い捨てで除菌不要

仕様

材質： PP / PET
 サイズ： 320×220（フェイスシールド部）
 部品構成： シールドホルダー（PP）
 フェイスシールド（PP、PET）

オプション


防曇処理
 ヘッドパット
 ネームラベル

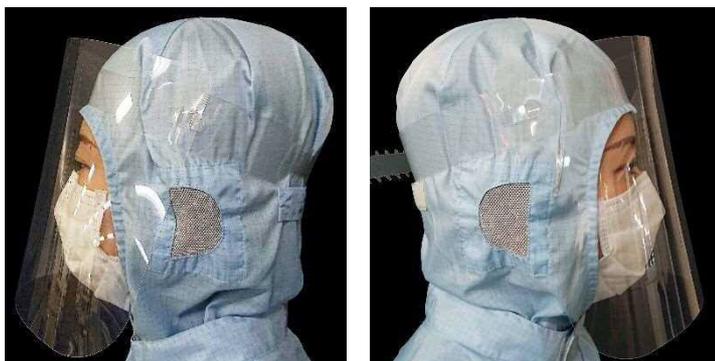


※マスク・防塵服は付属していません。

取り扱い説明


下記の番号に沿って組み立ててください

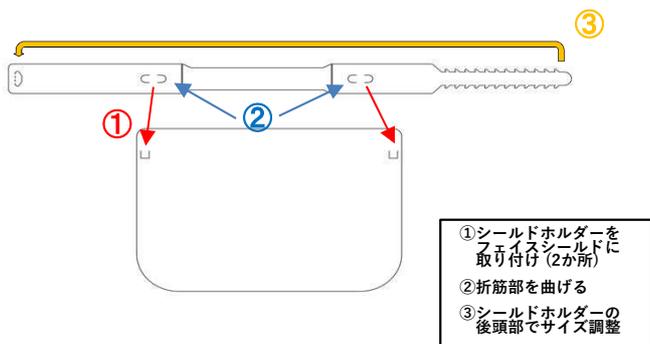

組立詳細写真

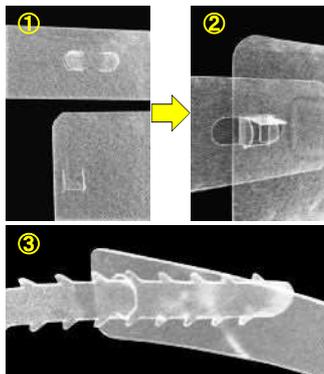

組立完成写真

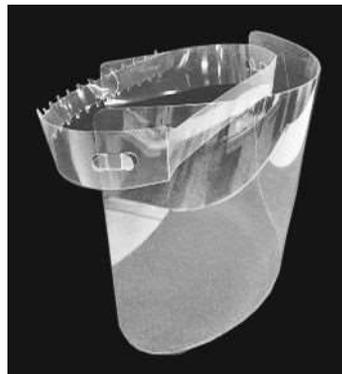

【お問い合わせ先】

千代田インテグレ株式会社
 〒340-0002 埼玉県草加市青柳1-7-27

TEL:0120-772-522
 URL: <http://www.chiyoda-i.co.jp>

更新日:2020年5月12日